

POKYNY PRE ZÍSKANIE KRVNEJ VZORKY

Pred začatím odberu krvi si starostlivo prečítajte celý postup.

Uchovávajúce mimo dosahu detí.


OBSAH:

PREPRAVNÁ SKÚMAVKA

Obsahuje absorpčný bavlnený tampón

STERILNÝ TAMPÓN

NÁPLAŠŤ

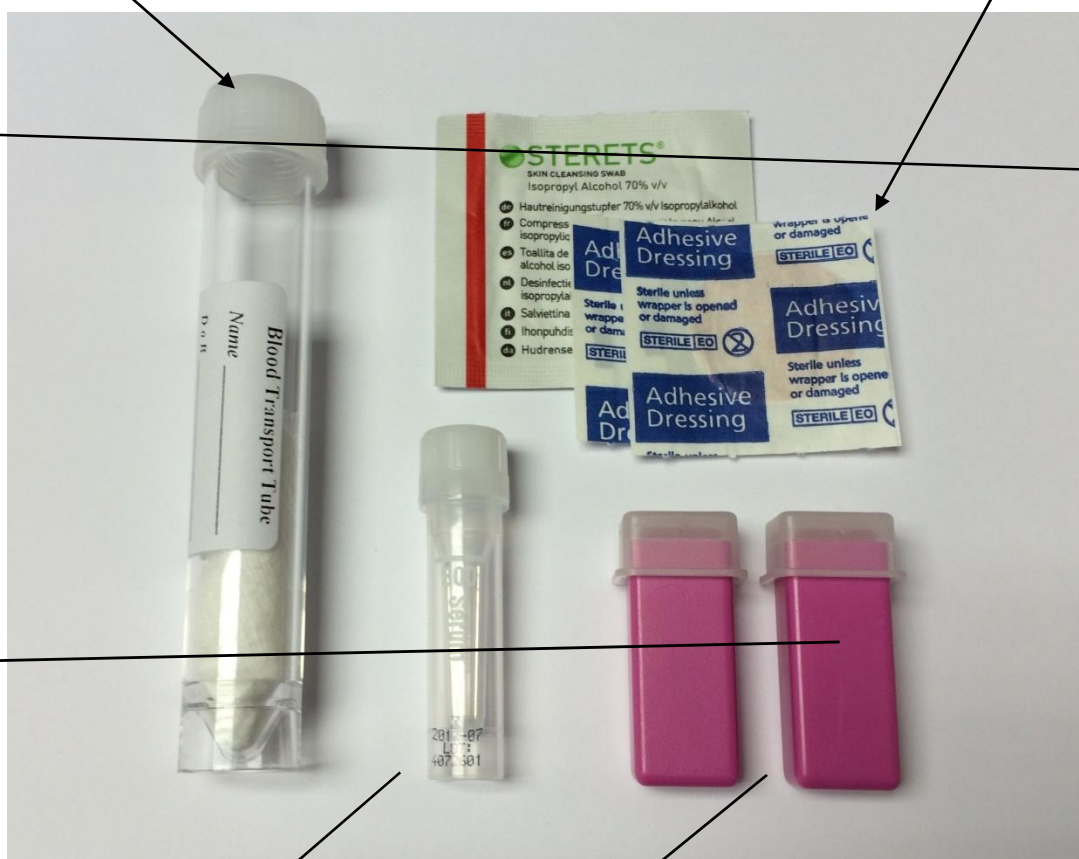

SKÚMAVKA NA ODBER KRVI/ODBERNÁ SKÚMAVKA

Iba na jednorazové použitie. Vyrobené a označené (CE) v súlade so smernicou 93 / 42EEC

BEZPEČNOSTNÉ LANCETY

Lanceta na pichnutie do prsta. Sterilná. Iba na jedno použitie. Farba sa môže líšiť.

Vyrobené a označené (CE) v súlade so smernicou 93 / 42EEC

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE VZORKY / FORMULÁR

PLASTOVÁ SPIATOČNÁ OBÁLKA

POSTUP

1. Umyte si ruky v teplej vode, zmäkčí to pokožku a podporí krvný obeh, čo následne uľahčí odber.
2. Vyberte malú skúmavku na odber krvi z prepravnej skúmavky.
3. Odstráňte uzáver zo skúmavky na odber krvi.
Poznámka: väčšia prepravná skúmavka obsahujúca absorpčný bavlnený tampón NESMIE byť použitá na odber krvi!
4. Vyberte prst alebo palec, z ktorého chcete odobrať krv, utrite ho priloženým sterilným tampónom a nechajte uschnúť.
5. Odstráňte ochranný kryt z bezpečnostnej lancety.
6. Priložte vyvýšený koniec bezpečnostnej lancety na prst. Pevne zatlačte, aby sa aktivoval mechanizmus lancety. V momente kontaktu s pokožkou môžete pocítiť ľahké pichnutie.
7. Jemne masírujte prst smerom k miestu vpichu, aby ste získali kvapku krvi.
8. Prejdite prstom cez okraj skúmavky určenej pre odber krvi tak, aby sa krv dostala do skúmavky. Pokračujte v odbere, až kým krv dosiahne BIELU ČIARU vyznačenú na skúmavke.*
9. Ak ste odobrali dostatočné množstvo krvi, umiestnite uzáver späť na skúmavku pre odber krvi.
10. Napíšte svoje meno na štítok prepravnej skúmavky, umiestnite skúmavku pre odber krvi dovnútra prepravnej skúmavky a nasadte uzáver.
11. Vyplňte Žiadosť o vyšetrenie vzorky a Záznam o informovanom súhlase.
12. Vložte použitú lancetu(y) do vrečka na odpad a vložte späť do plastového uzatvárateľného vrečka spolu s prepravnou skúmavkou a žiadosťou o vyšetrenie vzorky.
13. Umiestnite uzatvárateľné vrečko do igelitovej spiatočnej obálky a pošlite čo najskôr na adresu:

SEPEA s.r. o.
Púpavová 22
Bernolákovo
900 21

* V prípade, že sa prietok krvi zastaví skôr, než je skúmavka na odber krvi plná, je nevyhnutné použiť druhú bezpečnostnú lancetu na odobratie krvi z iného prsta.



577-23-01